

GIỚI HẠN BẢO HÀNH

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày mua hàng ghi trên phiếu bảo hành, VIETLIFE sẽ bảo hành cho phần máy của sản phẩm này. Với các lỗi của nhà sản xuất gây ra, VIETLIFE có thể sửa chữa, thay thế hoặc đổi mới đồ chính hãng tùy theo từng trường hợp cụ thể. Về dịch vụ bảo hành, làm ơn gửi lại sản phẩm lỗi cho VIETLIFE tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại các điểm phân phối chính hãng của VIETLIFE

Bảo hành này không bao gồm các lỗi gây ra bởi rơi vỡ, sử dụng sai, bảo dưỡng không đúng cách, sửa đổi không được phép hoặc kết nối vào nguồn điện không phù hợp

TÔI CÓ THỂ TRỮ SỮA TRONG THỜI GIAN BAO LÂU

Ở nhiệt độ phòng		Trong tủ lạnh	
Nhiệt độ	Thời gian trữ sữa	Loại	T.gian trữ sữa
15°C	24h	Đặt trong ngăn đá	Lên đến 2 tuần
16°C~23°C	10h		
24°C	4~6h	Đặt trong chai lạnh trữ sữa	3 đến 4 tháng
36°C~38°C	4h		
Ở nhiệt độ bảo quản		Đặt trong tủ đông dưới 0°C	6 đến 12 tháng
0°C~4°C	lên đến 8 ngày		

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE

ĐC: Số 2, ngõ 260 (Tầng 5) đường Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 04. 6269 0281 - Hotline: 0934 317 299 Fax: 04.6269 0279
Email: info@cuocsongviet.vn Website: www.mayhutsua.com.vn

speCtra⁹

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TCCL: CE (EU)
FDA (US)
ISO 9001
ISO 13485
KGMP



Shop Nam Chi
HOTLINE 0948806119

mayhutsua.hanoi.com

VỆ SINH SAU KHI SỬ DỤNG

1. Tháo đầu van và màng ra khỏi phễu hút sữa.
2. Làm sạch và khử trùng trong nước nóng khoảng 2 ~ 3 phút (Không dùng lò vi sóng)
3. Cần thận kéo ống khí ra và làm sạch với nước tẩy rửa.
4. Làm sạch ống khí ít nhất 1 tuần 1 lần, khi có sữa mẹ ở bên trong thì phải làm sạch ngay lập tức.

CÁCH BẢO QUẢN

Làm sạch tất cả các phụ kiện và thân chính của máy bằng miếng vải ẩm sau mỗi lần dùng máy.
Chú ý: Khi không sử dụng các phụ kiện van một chiều và máy trong một thời gian dài, nên cất giữ cẩn thận tại nơi khô thoáng.

CÁCH TRỮ SỮA ĐÃ ĐƯỢC VẮT:

1. Đảm bảo rằng tay sạch và khô trước khi hút sữa
2. Bơm trực tiếp vào trong bình trữ sữa
3. Trữ sữa trong tủ lạnh hoặc tủ đông tránh xa cửa, để phòng sự thay đổi nhiệt độ có thể làm hỏng sữa mẹ
4. Sử dụng tủ lạnh hoặc tủ đông trữ sữa được lâu nhất.

Chú ý: Làm lạnh sữa trong tủ lạnh khoảng 2 giờ trước khi cho vào tủ đông.

Cảnh báo: Nên dán nhãn ghi ngày và thời gian vắt sữa trước khi để sữa trong tủ lạnh hoặc tủ đông. Không trộn sữa tươi với sữa đã được làm lạnh.

RẢ ĐÔNG SỮA

1. Để sữa trong tủ lạnh ngăn mát khoảng vài giờ trước khi sử dụng
2. Trước khi cho trẻ ăn ngâm sữa trong nước ấm cho đến khi nhiệt độ sữa bằng nhiệt độ phòng
3. Vứt bỏ sữa ngay khi mở sữa bị vón cục

Cảnh báo: Không rã đông sữa trong lò vi sóng
Không làm đông lại sữa đã bị rã đông

KHÁC PHỤC SỰ CỐ

Điều kiện	Nguyên nhân	Kiểm tra	Giải pháp
Không hút	Pin đã hết (khi không dùng điện)	Hiện thị Pin trên màn hình LCD	Cắm điện để sử dụng kết hợp sạc pin cho đầy.
	Nút bật/tắt (ON/OFF)	Đã bật nút khởi động chưa	Nếu các chức năng hút không hoạt động khi đã bật nguồn, làm ơn liên hệ với nơi bán mua máy hoặc gọi trực tiếp tới Vietlife
	Đầu van và màng van	Màng van đã được lắp vào đầu van chưa	Tháo ra và lắp lại chúng cho đúng.
	Ống khí	Kiểm tra ống khí đã được kết nối với thân máy chưa	Nối ống khí với thân máy
Hút yếu	Bộ đổi nguồn điện	Kiểm tra nguồn điện adapter đã kết nối chưa	Kết nối chúng với nhau
	Lắp ráp có lỗi	Kiểm tra kết nối các phụ kiện với nhau	Rút phích điện ra và lắp lại phụ kiện cho đúng
	Phễu hút sữa	Kiểm tra xem có vấn đề với phễu hút không	Muø và thay thế phễu mới
Hút đau	Màng van một chiều	Kiểm tra xem có khoảng trống giữa van và màng van một chiều không	Lau sạch đảm bảo kín khí giữa van và màng van
	Phiếu mát xa silicone	Kiểm tra phiếu mát xa đã tháo ra khỏi phễu hút sữa chưa	Khi chuyển từ chế độ massage kích thích sữa về sang chế độ hút sữa nên tháo phiếu mát xa ra để áp lực hút được mạnh hơn.
Hút đau	Áp lực hút quá cao	Kiểm tra cấp độ hút	Thiết lập cấp độ hút thấp nhất và tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn hoặc bác sỹ.

CẢNH BÁO

Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng:

Khi sử dụng các sản phẩm điện, để đảm bảo an toàn nên luôn luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản sau:

NGUY HIỂM: Để giảm nguy cơ bị điện giật

1. Luôn luôn rút phích cắm sản phẩm ngay sau khi sử dụng.
2. Không sử dụng trong khi tắm
3. Không để sản phẩm ở nơi có thể bị kéo, bị rơi vào bồn tắm hoặc bồn rửa.
4. Không được đặt hoặc thả sản phẩm vào nước hoặc các chất lỏng khác.
5. Không nên cố gắng lấy sản phẩm khi nó bị rơi xuống nước mà chưa rút phích cắm điện ra.

CẢNH BÁO: Để giảm nguy cơ bị bỏng, điện giật, hỏa hoạn hoặc thương tích cho người.

1. Không bao giờ được bỏ mặc sản phẩm khi đang cắm điện.
2. Giám sát chặt chẽ khi sử dụng sản phẩm ở gần trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ.
3. Sử dụng sản phẩm đúng mục đích như trong mô tả của hướng dẫn sử dụng này.
4. Không sử dụng các phụ kiện không phải của nhà sản xuất. Không vận hành sản phẩm nếu: dây và phích cắm bị sút mẻ, hư hỏng, máy đã bị rơi vỡ, rơi vào nước hoặc bất kỳ phần nào của máy bị hư hỏng.
5. Luôn giữ cho máy tránh xa những nơi có nhiệt độ cao
6. Không bao giờ được sử dụng trong khi ngủ hoặc buồn ngủ.
7. Không vận hành sản phẩm ở ngoài trời hoặc nơi đang phun hơi ẩm hoặc nơi quá giàu oxy.
8. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng.
9. Không tự ý sửa chữa các linh kiện của máy.

HÚT SỮA ĐÚNG CÁCH

Hút sữa và cho con bú là một kỹ năng cần phải học, do đó bạn hãy kiên nhẫn và luyện tập để nắm vững kỹ năng này. Không nên thất vọng khi bạn hút được rất ít sữa hoặc không có sữa sau lần hút đầu tiên. Tuy nhiên cùng với thời gian bạn sẽ tự học được cách để điều khiển cơ chế ra sữa của cơ thể mình.

Nếu muốn có nhiều sữa, bạn phải thường xuyên kích thích việc tiết sữa bằng cách cho con bú trực tiếp hoặc hút sữa.

Chuẩn bị:

- Chọn vị trí ngồi thật thoải mái và thư giãn để hút sữa
- Nên uống sữa và ăn no trước khi hút sữa
- Hút sữa theo giờ nhất định cũng giúp ra sữa dễ dàng hơn.
- Chườm ngực bằng khăn ấm sẽ kích thích tuyến sữa giúp các ống dẫn sữa bơm sữa ra dễ dàng hơn.

Bắt đầu:

- Bật máy bằng công tắc "ON/OFF" (máy mặc định chế độ mát xa) Đặt đầu núm vú vào giữa tâm của phễu hút sữa.
- Đưa phễu hút vào ngực mát xa trước khi hút sẽ làm cho giai đoạn hút sữa tốt hơn (Sử dụng phễu massage silicone sẽ đỡ đau núm vú và kích thích sữa về nhanh hơn, nên bỏ phễu mát xa ra khi sữa đã về để áp lực hút được mạnh hơn)
- Bấm vào nút massage để chuyển sang chế độ hút sữa.
- Đặt áp lực hút và chu kỳ hút ở mức thấp để kích thích phân xạ ra sữa, sau khi thấy sữa về thì tăng dần áp lực hút và chu kỳ hút lên để chọn mức áp lực hút và chu kỳ hút hiệu quả nhất cho mình mà vẫn không gây đau vú.

Tư thế hút sữa:



ĐÚNG SAI SAI SAI

CẤU HÌNH MÁY



TÊN	CHẤT LIỆU	TÊN	CHẤT LIỆU
① Thân máy	ABS	⑧ Màng van	Silicone
② Bộ đổi nguồn	Silicone	⑨ Nắp đậy núm vú	P.P
③ Bộ chặn sữa	P.C	⑩ Núm vú	LSR
④ Ống khí	Silicone	⑪ Cáp nắp	P.P
⑤ Phiếu mát xa	Silicone	⑫ Đĩa	P.P
⑥ Phễu hút sữa	P.P	⑬ Bình đựng sữa	P.P
⑦ Đầu van	P.P	⑭ Chân đế	P.P
⑮ Cáp nối	P.P		Tương thích với các loại bình cổ rộng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- + Trọng lượng: 0,81Kg
- + Điện áp: 220V/50Hz
- + Pin sạc: 8.5V
- + Áp lực hút: 30 ~290 ± 10mmHg

CÁCH LẮP RÁP



MÀN HÌNH LCD

Hiện thị pin
Chu kỳ hút

NÚT ĐIỀU CHỈNH

Chế độ mát xa
Áp lực hút
Chu kỳ hút

Ghi chú: Nút ON/OFF để khởi động hoặc tắt nguồn
- Nút Massage để bật chế độ Mát xa hoặc hút sữa.
- Nút Cycle (+, -) điều chỉnh tăng/giảm chu kỳ hút
- Nút Vacuum (+, -) điều chỉnh tăng/giảm áp lực hút.
(Xem clip hướng dẫn cách lắp ráp và sử dụng máy hút sữa I-Spectra tại Website: www.mayhutsua.com.vn)