

GIỚI HẠN BẢO HÀNH

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày mua hàng ghi trên phiếu bảo hành, VIETLIFE sẽ bảo hành cho phần máy của sản phẩm này. Với các lỗi của nhà sản xuất gây ra, VIETLIFE có thể sửa chữa, thay thế hoặc đổi mới đồ chính hãng tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Về dịch vụ bảo hành, làm ơn gửi lại sản phẩm lỗi cho VIETLIFE tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại các điểm phân phối chính hãng của VIETLIFE

Bảo hành này không bao gồm các lỗi gây ra bởi rơi vỡ, sử dụng sai, bảo dưỡng không đúng cách, sửa đổi không được phép hoặc kết nối vào nguồn điện không phù hợp

TÔI CÓ THỂ TRỮ SỮA TRONG THỜI GIAN BAO LÂU

Ở nhiệt độ phòng		Trong tủ lạnh	
Nhiệt độ	Thời gian trữ sữa	Loại	T.gian trữ sữa
15°C	24h	Đặt trong ngăn đá	Lên đến 2 tuần
16°C~23°C	10h		
24°C	4~6h	Đặt trong chai lạnh trữ sữa	3 đến 4 tháng
36°C~38°C	4h		
Ở nhiệt độ bảo quản		Đặt trong tủ đông dưới 0°C	6 đến 12 tháng
0°C~4°C	lên đến 8 ngày		

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE

ĐC: Số 2, ngõ 260 (Tầng 5) đường Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 04. 6269 0281 - Hotline: 0934 317 299 Fax: 04.6269 0279
Email: info@cuocsongviet.vn Website: www.mayhutsua.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

speCtra Dew 350

ISO 9001
ISO 13485
KGMP



Shop Nam Chi mayhutsua.hanoi.com
HOTLINE 0948806119

VỆ SINH SAU KHI SỬ DỤNG

1. Tháo đầu van và màng ra khỏi phễu hút sữa.
2. Làm sạch và khử trùng trong nước nóng khoảng 2 ~ 3 phút (Không dùng lò vi sóng)
3. Cần thận kéo ống khí ra và làm sạch với nước tẩy rửa.
4. Làm sạch ống khí ít nhất 1 tuần 1 lần, khi có sữa mẹ ở bên trong thì phải làm sạch ngay lập tức.

CÁCH BẢO QUẢN

Làm sạch tất cả các phụ kiện và thân chính của máy bằng miếng vải ẩm sau mỗi lần dùng máy.

Chú ý: Khi không sử dụng các phụ kiện van một chiều và máy trong một thời gian dài, nên cất giữ cẩn thận tại nơi khô thoáng.

CÁCH TRỮ SỮA ĐÃ ĐƯỢC VẮT

1. Đảm bảo rằng tay sạch và khô trước khi hút sữa
2. Bơm trực tiếp vào trong bình trữ sữa
3. Trữ sữa trong tủ lạnh hoặc tủ đông tránh xa cửa, để phòng sự thay đổi nhiệt độ có thể làm hỏng sữa mẹ
4. Sử dụng tủ lạnh hoặc tủ đông trữ sữa được lâu nhất.

Chú ý: Làm lạnh sữa trong tủ lạnh khoảng 2 giờ trước khi cho vào tủ đông.

Cảnh báo: Nên dán nhãn ghi ngày và thời gian vắt sữa trước khi để sữa trong tủ lạnh hoặc tủ đông. Không trộn sữa tươi với sữa đã được làm lạnh.

RÁ ĐÔNG SỮA

1. Để sữa trong tủ lạnh ngăn mát khoảng vài giờ trước khi sử dụng
2. Trục khi cho trẻ ăn ngâm sữa trong nước ấm cho đến khi nhiệt độ sữa bằng nhiệt độ phòng
3. Vứt bỏ sữa ngay khi mở sữa bị vón cục

Cảnh báo: Không rã đông sữa trong lò vi sóng
Không làm đông lại sữa đã bị rã đông

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Điều kiện	Nguyên nhân	Kiểm tra	Giải pháp
Không hút	Công tắc	Công tắc đã bật chưa	Nếu các chức năng hút không hoạt động khi đã bật nguồn, làm ơn liên hệ với nơi bạn mua máy hoặc gọi trực tiếp tới VIETLIFE
	Ống khí	Kiểm tra ống khí đã được kết nối với thân máy chưa	Nối ống khí với thân máy
	Đầu van và màng van	Màng van đã được lắp vào đầu van chưa	Tháo ra và lắp lại chúng cho đúng.
Hút yếu	Nắp khí	Kiểm tra nắp khí trên thân máy	Nếu hút 1 bên thì phải đóng nắp khí trên thân máy lại.
	Lắp ráp có lỗi	Kiểm tra kết nối các phụ kiện với nhau	Rút phích điện ra và lắp lại phụ kiện cho đúng
Hút đau	Phễu hút sữa	Kiểm tra xem có vấn đề với phễu hút không	Mua và thay thế phễu mới
	Màng van một chiều	Kiểm tra xem có khoảng trống giữa van và màng van không	Lau sạch đảm bảo kín khí giữa van và màng van
Hút đau	Áp lực hút quá cao	Kiểm tra cấp độ hút	Thiết lập cấp độ hút thấp nhất và tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn hoặc bác sỹ.

Ghi chú:

Trong trường hợp áp lực của máy hút sữa bị thấp hơn tiêu chuẩn, kiểm tra nguồn cung cấp và đảm bảo rằng phễu hút sữa và các điểm nối lắp ráp chắc chắn. Khi máy phát ra tiếng động không bình thường hoặc khi sữa vắt tràn vào trong máy liên hệ ngay với nơi mua sản phẩm hoặc trung tâm bảo hành của VIETLIFE

CẢNH BÁO

Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng:

Khi sử dụng các sản phẩm điện, để đảm bảo an toàn nên luôn luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản sau:

NGUY HIỂM: Để giảm nguy cơ điện giật

1. Luôn luôn rút phích cắm sản phẩm ngay sau khi sử dụng.
2. Không sử dụng trong khi tắm
3. Không để sản phẩm ở nơi có thể bị kéo, bị rơi vào bồn tắm hoặc bồn rửa.
4. Không được đặt hoặc thả sản phẩm vào nước hoặc các chất lỏng khác.
5. Không nên cố gắng lấy sản phẩm khi nó bị rơi xuống nước mà chưa rút phích cắm điện ra.

CẢNH BÁO: Để giảm nguy cơ bị bỏng, điện giật, hỏa hoạn hoặc thương tích cho người.

1. Không bao giờ được bỏ mặc sản phẩm khi đang cắm điện.
2. Giám sát chặt chẽ khi sử dụng sản phẩm ở gần trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ.
3. Sử dụng sản phẩm đúng mục đích như trong mô tả của hướng dẫn sử dụng này.
4. Không sử dụng các phụ kiện không phải của nhà sản xuất. Không vận hành sản phẩm nếu: dây và phích cắm bị sút mẻ, hư hỏng, máy đã bị rơi vỡ, rơi vào nước hoặc bất kỳ phần nào của máy bị hư hỏng.
5. Luôn giữ cho máy tránh xa những nơi có nhiệt độ cao
6. Không bao giờ được sử dụng trong khi ngủ hoặc buồn ngủ.
7. Không vận hành sản phẩm ở ngoài trời hoặc nơi đang phun hơi ẩm hoặc nơi quá giàu oxy.
8. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng.
9. Không tự ý sửa chữa các linh kiện của máy.

HÚT SỮA ĐÚNG CÁCH

Hút sữa và cho con bú là một kỹ năng cần phải học, do đó bạn hãy kiên nhẫn và luyện tập để nắm vững kỹ năng này. Không nên thất vọng khi bạn hút được rất ít sữa hoặc không có sữa sau lần hút đầu tiên. Tuy nhiên cùng với thời gian bạn sẽ tự học được cách để điều khiển cơ chế ra sữa của cơ thể mình.

Nguồn sữa có nhiều hay không phụ thuộc vào nguyên tắc cung cấp. Nếu muốn có nhiều sữa, bạn phải thường xuyên kích thích việc tiết sữa bằng cách cho con bú trực tiếp hoặc hút sữa.

Chuẩn bị:

- Chọn vị trí ngồi thật thoải mái và thư giãn để hút sữa
- Nên uống sữa và ăn no trước khi hút sữa
- Hút sữa theo giờ nhất định cũng giúp ra sữa dễ dàng hơn.
- Chườm ngực bằng khăn ấm sẽ kích thích tuyến sữa giúp các ống dẫn sữa bơm sữa ra dễ dàng hơn.

Bắt đầu:

- Bật máy bằng công tắc "ON/OFF" nằm phía sau động cơ. Đặt đầu núm vú vào giữa tâm của phễu hút sữa.
- Đưa phễu hút vào ngực massage trước khi hút sẽ làm cho giai đoạn hút sữa tốt hơn (Sử dụng phễu massage silicone sẽ đỡ đau núm vú và kích thích sữa về nhanh hơn, bỏ phễu massage ra khi sữa đã về áp lực hút sẽ mạnh hơn)
- Đặt mức áp lực thấp (MIN) để kích thích phân xạ ra sữa, sau khi thấy sữa về thì từ từ tăng áp lực hút lên để chọn mức áp lực hút hiệu quả nhất cho mình mà vẫn không gây đau vú.

Tư thế hút sữa:



ĐÚNG

SAI

SAI

SAI

CẤU HÌNH MÁY



TÊN	CHẤT LIỆU	TÊN	CHẤT LIỆU
① Thân máy	ABS	⑧ Màng van	Silicone
② Ống nối	Silicone	⑨ Nắp đáy núm vú	P.P
③ Bộ chặn sữa	P.C	⑩ Núm vú	LSR
④ Ống khí	Silicone	⑪ Cáp nắp	P.P
⑤ Phễu mát xa	Silicone	⑫ Đĩa	P.P
⑥ Phễu hút sữa	P.P	⑬ Bình đựng sữa	P.P
⑦ Đầu van	P.P	⑭ Chân đế	P.P
⑮ Cáp nối	P.P	Tương thích với các loại bình cổ rộng	

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- + Trọng lượng: 2.1 Kg
- + Điện áp: 220V/50Hz
- + Công suất: 32W/h
- + Áp lực hút: 60 ~330 ± 10mmHg

CÁCH LẮP RÁP



(Xem clip hướng dẫn cách lắp ráp và sử dụng máy hút sữa Spectra Dew-350 tại Website: www.mayhutsua.com.vn)

Khi sử dụng hút 2 bên ngực cùng 1 lúc:
Bỏ nắp khí ra và kết nối ống hút thứ 2 vào.
Trong quá trình hút 2 bên áp lực hút có thể giảm xuống một chút.

Lưu ý: Đóng nắp khí khi chỉ hút 1 bên



[Hút 1 bên]

[Hút 2 bên]