



Hướng dẫn dùng máy hút sữa Medela Swing Maxi

Máy hút sữa Medela Swing Maxi 2 bên massage là **máy hút sữa đôi**, với thiết kế gọn nhẹ rất lý tưởng cho các bà mẹ đang tìm kiếm một giải pháp hút sữa đơn giản, kinh tế và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng để tăng nguồn sữa mẹ và để sử dụng hàng ngày.





I. Ưu điểm của Medela Swing Maxi

1. Duy trì nguồn sữa mẹ khi đi làm: hút sữa đôi giúp **tăng cường và duy trì nguồn sữa mẹ** lâu dài.
2. Hiệu quả cao: **công nghệ hút sữa 2 pha** với chế độ kích thích phản xạ bài tiết sữa của người mẹ giúp sữa về nhanh hơn và rút ngắn tối đa thời gian hút sữa.
3. Tạo sự thoải mái tối đa: máy cho phép bạn điều chỉnh mức áp lực hút phù hợp với cơ thể của mình.
4. Sử dụng dễ dàng: việc tháo lắp, sử dụng và vệ sinh máy rất đơn giản và dễ dàng.
5. Linh hoạt: với thiết kế nhỏ, gọn giúp cho các bà mẹ **có thể hút sữa tại nhà và tại nơi làm việc**, máy có thể dùng điện lưới hoặc pin 3A.
6. Với **máy hút sữa Medela Swing Maxi** sẽ hút sữa hai bên ngực đồng thời sẽ giúp tuyến sữa dẫn lưu tốt hơn và điều này sẽ làm tăng nguồn cung cấp sữa của người mẹ.
7. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn 18% sữa so với hút sữa một bên trong mỗi lần hút.
8. Hút sữa đôi sẽ **cung cấp sữa với hàm lượng năng lượng cao hơn**.
9. Tiết kiệm thời gian: hút sữa đôi giảm thời gian vắt sữa xuống còn một nửa.
10. Công nghệ hút sữa 2 pha dựa trên nhịp bú sinh lý tự nhiên của trẻ: đầu tiên trẻ bú với nhịp bú

nhanh, liên tục để kích thích phản xạ bài tiết sữa của người mẹ, tiếp theo trẻ bú với nhịp bú dài hơn, sâu hơn giúp dòng sữa chảy ra dễ dàng nhất.

11. Phản xạ bài tiết sữa của người mẹ xảy ra nhanh và dòng sữa chảy ra dễ dàng là yếu tố quyết định giúp giảm thời gian hút sữa đáng kể.

II. Lắp ráp Medela Swing Maxi

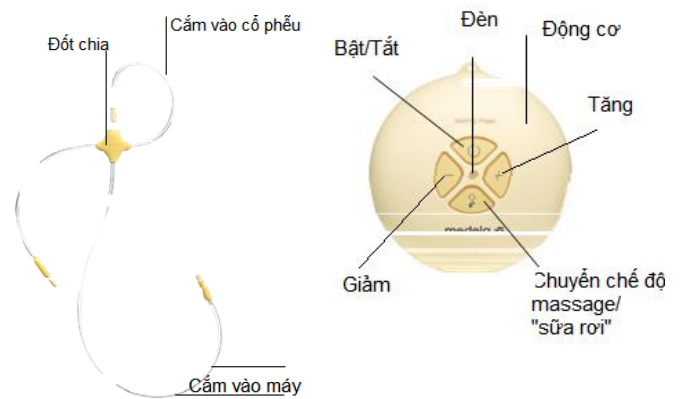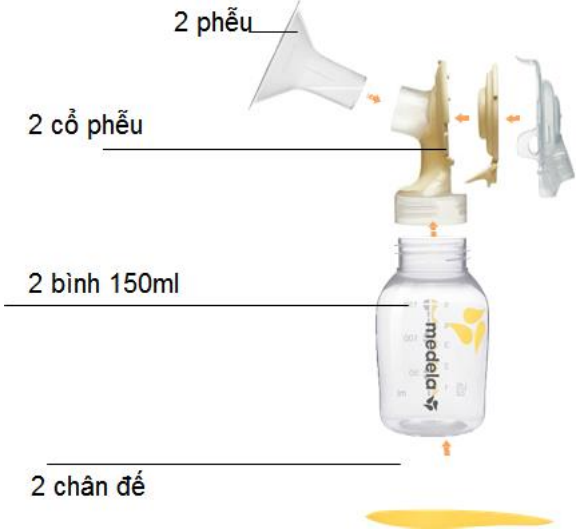

KHI DÙNG PIN



Trong trường hợp các mẹ muốn hút một bên :



SAU KHI LẮP RÁP



III. HÚT SỮA

Vị trí đặt phễu để hút sữa như sau :



- Bấm nút để bật máy
- Mặc định máy sẽ vào chế độ massage trong 2 phút, đèn LED sẽ nhấp nháy
- Sau 2 phút, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ « sữa rơi ». Đèn LED sáng nhưng không nhấp nháy.
- Ở mỗi chế độ đều có thể điều chỉnh các nút « + » hoặc « - » để điều chỉnh tăng/giảm về lực.

IV. VỆ SINH

Vệ sinh tất cả các phụ kiện có thể tiếp xúc với sữa mẹ: **phễu hút, cổ nối phễu, van, nắp đậy van, bình sữa**. Không cần vệ sinh dây hút (ống khí).

- Vệ sinh bằng nước rửa bình sữa: dùng bàn chải lông mềm mịn để hạn chế trầy xước gây tăng khoảng hở → giảm lực hút. hong khô sau khi rửa.
- **Đun sôi tiệt trùng:** chỉ áp dụng sau khi đã rửa sạch bằng nước rửa bình sữa (sạch chất béo). Đun sôi trong 5 phút. Tránh để phụ kiện chạm đáy nồi và thành nồi. Máy mới mua nên áp dụng đun sôi tiệt trùng (theo đề nghị của nhà sản xuất). Sử dụng loại nước rửa bình sữa tốt, hong khô và cất trữ vệ sinh thì không nhất thiết phải đun sôi mỗi ngày. **Hạn chế đun sôi van (mềm)** thường xuyên, vì như thế vật liệu của van dễ bị lão hóa.
- **Vệ sinh ngay** sau mỗi lần sử dụng và hong khô trên 1 tấm vải /giấy/ khay đựng sạch. Có thể đựng tất cả trong hộp nhựa kín (như Super Lock), hoặc túi nylon sạch buộc kín (loại túi trong không dùng vật liệu tái chế nhé) rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh.

V. BẢO QUẢN SỮA MẸ

Sữa mẹ đã hút/ vắt nhưng chưa dùng ngay có thể được bảo quản lạnh, hoặc đông đá như sau:

- Nhiệt độ phòng >29°C – tối đa 1g
 - Nhiệt độ phòng máy lạnh <26°C, tối đa 6h
 - Túi đá khô để vận chuyển – tối đa 24h
 - Ngăn mát tủ lạnh – tối đa 48h
 - Ngăn đá tủ lạnh nhỏ 1 cửa – tối đa 2 tuần
 - Ngăn đá tủ lạnh 2 cửa (ngăn đá có cửa riêng) – tối đa 3 tháng
 - Tủ đông chuyên dụng – tối đa 6 tháng
 - Dùng bình trữ sữa, hoặc túi trữ sữa để lưu sữa. Dùng băng keo giấy, hoặc bút dạ/ bút lông mực để ghi ngày tháng hút/ vắt lên bình/ túi để ghi nhớ ngày lưu sữa.
- Cách rã đông: chuyển bình/ túi sữa xuống ngăn mát để tan dần. Cách làm ấm: ngâm bình, túi sữa vào tô nước ấm (40°C).

HOTLINE tư vấn : 0948806119

BÁN & CHO THUÊ MÁY HÚT SỮA

medela



SHOP NAM CHI - MAYHUTSUAHANAI.COM